




DE Gebrauchsanweisung Infrarot-Fieberthermometer TM A77
GB Instruction manual Infrared body thermometer TM A77
FR Mode d'emploi Thermomètre médical infrarouge TM A77

Gerät und Bedienelemente
Device and controls
Appareil et éléments de commande

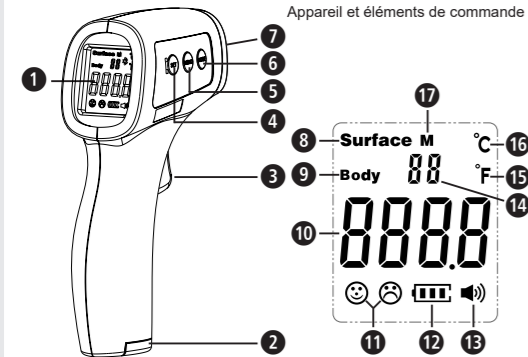

Zeichenerklärung Explanation of symbols Légende des symboles

WICHTIG! IMPORTANT!
Die Beachtung der Gebrauchsanweisung wird empfohlen.

WARNUNG! WARNING! AVERTISSEMENT
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG! CAUTION! ATTENTION
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS! NOTE! REMARQUE
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

IP22
Angabe der Schutzart gegen Fremdkörper und Wasser

Nicht sterile Verpackung / Non sterile packaging

LOT
LOT-Nummer / LOT number / Numéro de LOT

SN
Serien-Nummer / Serial number / Numéro de série

Hersteller / Manufacturer / Fabricant

Herstellungsdatum / Date of manufacture / Date de fabrication

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

CE-Zeichen (Konformitätszeichen)
CE symbol (conformity symbol)

Betriebstemperatur / Operating temperature / Température d'utilisation

Luftfeuchtigkeit im Betrieb / Operating humidity / Humidité de l'air pour l'utilisation

Atmosphärischer Betriebsdruck / Operating atmospheric pressure / Pression atmosphérique pour l'utilisation

Nicht entsorgen! Für Mehrfachverwendung vorgesehen!

Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
Authorized Representative in the European community

DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das berührunglose Infrarot-Fieberthermometer TM A77 von medisana ist für die intermittierende Messung und Überwachung der menschlichen Körpertemperatur durch Verbraucher im häuslichen Bereich und in der Primärvorsorge als Screening-Instrument konzipiert.

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
Bei Zwecken Fremdung erlischt der Garantieanspruch.
Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
Bei Zwecken Fremdung erlischt der Garantieanspruch.
Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

- Keine Wartung/Instandhaltung, während das Thermometer benutzt wird.
Berühren Sie niemals Batterien und den Patienten gleichzeitig.

- Keine Wartung/Instandhaltung, während das Thermometer benutzt wird.
Berühren Sie niemals Batterien und den Patienten gleichzeitig.

- Keine Wartung/Instandhaltung, während das Thermometer benutzt wird.
Berühren Sie niemals Batterien und den Patienten gleichzeitig.

Lieferumfang und Verpackung
Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist.

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

WARNUNG - Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Was ist Fieber?
Die Körpertemperatur variiert von Person zu Person und schwankt im Laufe des Tages.

Gerät und Bedienelemente

- 1 Beleuchtete LCD-Anzeige 2 Batteriefach 3 ON-Taste (Start der Messung)
4 SET-Taste 5 MEMO-Taste 6 MODE-Taste 7 IR Sensor 8 Oberflächentemperatur-Messmodus

Batterien entnehmen / einlegen
Sollte nach einer gewissen Betriebsdauer die Anzeige für schwache Batterie 12 oder gar nichts mehr in der LCD-Anzeige 1 erscheinen, müssen 2 neue 1,5V-Batterien (Typ AAA / LR03) eingesetzt werden.

Batteriewechsel: Schieben Sie den Batteriefachdeckel an der Rifflung nach unten und nehmen Sie den Deckel ab.

WARNUNG BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE



- Batterien nicht auseinandernehmen!
Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen!
Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!

Anwendung
Allgemeine Hinweise:
Die Umgebungstemperatur sollte stabil sein. Halten Sie das Gerät von größeren Ventilatoren, direktem Sonnenlicht oder Lüftungsschlitzen von Klimaanlage usw. fern.

Einstellung des Messmodus
Drücken Sie bei laufendem Gerät die MODE-Taste 6, um zwischen dem „Body“-Modus und dem „Surface“-Modus umzuschalten.

Fiebmessung durchführen

- 1. Schalten Sie das Thermometer durch Druck auf die ON-Taste 3 ein.
2. Richten Sie das Thermometer sofort auf die Mitte der Stirn aus.

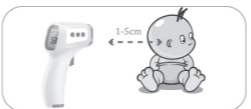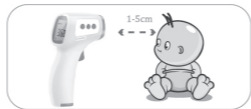

Oberflächenmessung durchführen

- 1. Schalten Sie das Thermometer ein, indem Sie die ON-Taste 3 drücken.
2. Richten Sie den Sensor mit einem Abstand von min. 5 bis max. 15 cm auf die Mitte des Objekts.

Abrufen und Löschen von Speicherdaten

Bitte werden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.

Parameter-Einstellungen
Das Gerät erlaubt einige individuelle Einstellungen (F1 bis F3): Drücken und halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die SET-Taste 4, um diese Einstellungen zu modifizieren.

Drücken Sie jeweils die MODE-TASTE 6 bzw. MEMO-Taste 5, um den Wert zu verstellen und die SET-Taste 4, um zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen
Drücken und halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die MODE-Taste 6, bis „rst“ auf der Anzeige erscheint.

Table with 3 columns: Anzeig, Problem, Lösung. Row 1: Hi, Gemessene Körpertemperatur außerhalb der normalen Grenzen, Wiederholen Sie die Messung im „Body“-Modus in korrekter Weise. Row 2: Lo, Betriebstemperatur nicht korrekt, Stellen Sie die korrekten Betriebsbedingungen her und warten Sie 30 Minuten, bis Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Table with 3 columns: Anzeig, Problem, Lösung. Row 1: Distanz größer als 1 - 5 cm, Die optimale Distanz ist 1 cm. Row 2: Inkorrekte Messposition, Beachten Sie die Hinweise. Row 3: Schweiß, Stirmhaare oder ähnliche Hindernisse, Entfernen Sie die Hindernisse. Row 4: Anzeige flackert oder schaltet sich ab, Ersetzen Sie die Batterien. Row 5: Umgebungstemperatur ändert sich zu schnell, Umgebungsbedingungen müssen stabil sein.

Sollten sich die Probleme nicht mit diesen Hinweisen lösen lassen oder andere Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

Pflege und Lagerung

- Der IR Sensor 8 ist das empfindlichste Teil des medisana Infrarot-Fieberthermometer TM A77.
Schützen Sie ihn vor Verschmutzungen oder Beschädigungen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben.

Technische Daten

Table with 2 columns: Name und Modell; Anzeigesystem; Spannungsvorsorgung; Messbereich; Messgenauigkeit; Anzeigauflösung; Messdauer; Speicherkapazität; Autom. Abschaltung; Batterie-Lebensdauer; Betriebstemperatur; Lager-/Transporttemperatur; Abmessungen; Gewicht; Artikel Nr.; EAN Code. Includes technical specifications for medisana Infrarot-Fieberthermometer TM A77.

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Die CE-Kennzeichnung des Gerätes bezieht sich auf die EU-Richtlinie 93/42/EEC. Das Gerät ist für den Hausgebrauch konzipiert.

Garantie- und Reparaturbedingungen

- 1. Auf medisana Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.


Hetaida Technology Co., Ltd.
4F, BaiShiDa High-Tech Park, XiangDong Industrial Area, DaLingShan Town, DongGuan City, Guangdong, China.

WellKang Ltd
16 Castle St, Dover, CT16 1PW, UK
Web: www.CEmark.com, www.CE-marking.com, www.CE-marking.eu

Die Serviceadresse finden Sie auf dem separaten Beilageblatt.

GB Safety Information

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.

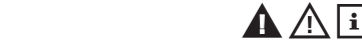

Intended use
The medisana non-contact infrared body thermometer TM A77 is designed to be used for intermittent measurement and monitoring of human body temperature by consumers in the home setting and primary care setting as screening tool.

- Only use the unit for the specific purpose described in the instruction manual. Any misuse will void the warranty.
The unit is not designed for commercial use.
Using this thermometer is no substitute for consulting a doctor.

- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
The temperature in the forehead and temple area differs from the internal temperature, which is taken orally or rectally.

Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use it and contact your dealer or your service centre.

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.

WARNING - Pay attention, that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

What is fever?

- Body temperature varies from person to person and fluctuates during the course of the day.
For this reason, it is suggested to know one's normal, healthy forehead temperature to correctly determine the temperature.

Unit and controls

- 1 Backlight LCD 2 Battery compartment 3 ON-button (Start of measurement)
4 SET-button 5 MEMO-button 6 MODE-button 7 IR Sensor

Removing / inserting batteries
If the low battery indicator 17 or nothing appears in the LC-display 1 after a certain period of use, you must replace the batteries with two new 1.5V-batteries (type AAA / LR03).

Battery replacement: Slide the lid of the battery compartment cover downwards and take the cover off. Take out the batteries. Put in two new 1.5V-batteries (AAA / LR03).











